



Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado

Guía de referencia rápida para el TouchChat®

Asistencia con TouchChat
support@touchchatapp.com
www.touchchatapp.com

Es una buena idea conservar una copia de todos los archivos de vocabulario personalizados en una computadora. Hay varias opciones dependiendo de lo que tenga disponible.


Nota: Esta función no está disponible en el TouchChat Lite.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con iTunes

Es una buena idea conservar una copia de todos los archivos personalizados en una computadora. Sugerimos una conexión alámbrica con una computadora para copiar los archivos de forma consistente.

1. Conecte el equipo a la computadora.
2. Abra iTunes en la computadora.
3. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escoger un vocabulario nuevo**.

4. Seleccione **Menú, Importar/Exportar y Exportar a iTunes**.
5. En el menú, seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar y luego **Guardar**.
6. En iTunes en la computadora, toque el símbolo del equipo que aparece en la parte superior izquierda de la ventana.

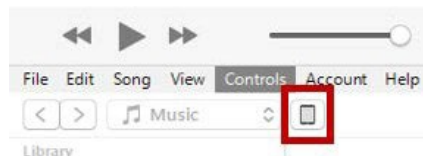


7. En la ventana, toque la opción de Compartir archivos (“**File Sharing**”) a mano izquierda.
8. En la columna de aplicaciones (Apps), seleccione el TouchChat.
9. En la columna bajo Documentos de TouchChat (“**TouchChat Documents**”), seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar.
10. Toque Grabar (“**Save**”) en la inferior derecha. Aparecerá una ventana para grabar.
11. Vaya a la carpeta en donde desea grabar el archivo y toque Seleccionar carpeta (“**Select Folder**”).
12. Toque OK (“**Done**”) para salir de iTunes.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con iShare

¡Importante! Antes de empezar este procedimiento, asegúrese que el equipo esté conectado al Internet. En el equipo, vaya a **Configuración** y luego **Wi-Fi**.


Para usar iShare, necesitará una cuenta de iShare.

1. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú** y **Servicio de iShare**.

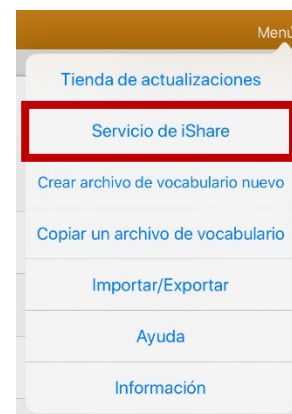


3. Seleccione **Ingresar a iShare**.

Nota: Si no tiene una cuenta de iShare, puede suscribirse a un período probatorio de 365 días seleccionando **Registración a iShare**. Ingrese su nombre, cree y confirme una contraseña y luego **Registrar**.

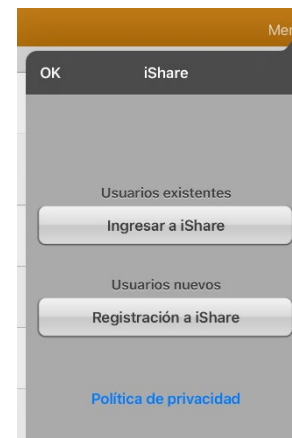

4. Ingrese el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de iShare.
5. Seleccione **Ingresar** y **OK**.
6. Seleccione la carpeta que desea usar.

7. Seleccione **+** y luego el archivo que desea grabar.

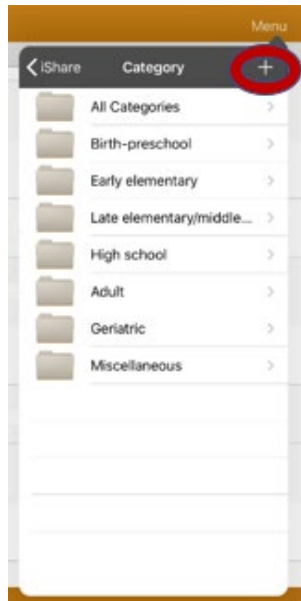

8. Ingrese un nombre, una descripción, palabras claves y la versión del archivo.
9. Seleccione Subir ("**Upload**") y luego **Okay**.

Para descargar un archivo grabado: Vaya a la carpeta, seleccione el archivo y Descargar ("**Download**").

Para borrar un archivo grabado: Vaya a la carpeta, seleccione el archivo, toque **Borrar** ("**Delete**") y confirme.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con **AirDrop**[®], **Dropbox**[®], **Google Drive**[™] o **Email**


1. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escojer un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú** e **Importar/Exportar**.



3. Seleccione **Exportar y compartir**.



4. Seleccione el archivo de vocabulario que desee exportar.
5. Seleccione **OK** y el método que desea usar para compartir el archivo.

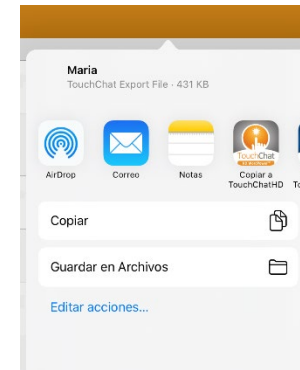

- **AirDrop:** Tanto Bluetooth[®] como Wi-Fi[®] deben estar activos. Aparecerán los equipos cercanos con AirDrop activado que puedan aceptar el archivo. Seleccione el equipo deseado.
- **Dropbox:** Requiere una cuenta de Dropbox. Wi-Fi debe estar activado y necesita la aplicación de Dropbox en su equipo.
- **Google Drive:** Requiere Google Drive en el equipo y acceso a Wi-Fi.
- **Email:** Requiere un correo electrónico configurado en el equipo y acceso a Wi-Fi.