



语力 (WordPower) 词汇快速参考指南

语力 60 (WordPower®) (WP) 是一个基于词汇的辅助性与替代性沟通系统，旨在促进快速、轻松的语言生成沟通系统。它包含了按逻辑类别组织的高频核心词^{1,5}，同时也涵盖了名词、形容词等语法词类。在造句过程中，用户通常只要按下两个按钮，就可以找到自己想说的下一个词。语力是由 Nancy L. Inman, M.A.T., CCC-SLP 专为沟通设备开发的。Nancy 以其在开发、实施和教导基于词汇的沟通程序方面的成就，而在辅助性与替代性沟通领域广为人知。

1 核心词——是指对话中约 80% 的情况下使用的词汇 (Christine A. Marvin, David R. Beukelman, Denise Bilyeu, AAC, 卷 10, 1994 年 12 月)。我们很少去思考这些词汇，但它们在平时日常说话中占很大比例，比如，我、你、停、走，等等。

2 边缘词——这些词通常是名词，而对于每个人和每个情况而言，边缘词都不一样。如果你是一名滑雪运动员，就无需使用与美式足球相关的名词（球、得分、触地得分等）来讨论所从事的运动。

3 语法词类——针对以下语法词类，语力采用了有所调整的 Fitzgerald 图例编排和颜色高亮模式，这些词类是：代词；动词；形容词；副词；连词/介词和名词。

4 类别——语力使用类别页面来组织词汇。这些类别页面由语法词类或特定分组组成，如地点（与地点相关的内容）或时间（例如，一周中的七天、一年中的月份、与时间相关的词，如“之前”和“之后”）。

5 高频词——日常对话中的常用词。

语力词汇文件

TouchChat® 中提供一个简体中文词汇文件，包含 60 个按钮配置。每个页面上的 60 个按钮形成了一个丰富的词汇库，包含数千个可用于交流的字。

语力的指导原则

1. 基于词汇的系统。将核心词¹作为重点，边缘词²也可以使用。
2. 预测设计使用了高频核心词^{1,5}，便于快速轻松地生成句子。
3. 关注语音表达效率——设计直观且便于使用。
4. iOS 系统键盘可用于输入词汇中未包含的单词。
5. 语力文件通过程序编制纳入了数百个动词、形容词和名词，同时还可以添加其他词汇来满足个人的定制化和特定需求。

组织结构

语力的主页展示了常用词汇⁵。这样可以方便用户快速一键单击所选词汇（“完”），并可以从主页开始简单造句（“完了”）。



核心词¹是主页的主体内容，语法词类³、类别⁴和边缘词²则位于主页边缘。



为了减少点击按钮的次数，加快沟通效率，接入主页的许多页面采用了一旦选定后就返回到主页的设计模式。如果需要在单个页面上停留更长时间，可以使用“锁页”按钮来阻止系统返回至主页面。

文件的大部分内置了运动规划功能，以便在不同页面的相同位置找到同一词汇：



